




Um die passende Größe des InView Kondom-Urinals zu ermitteln, bestimmen Sie mit der InView Messschablone den Durchmesser Ihres Penis.



Waschen Sie den Penis gründlich mit milder Seife. Reinigen Sie mit klarem Wasser und trocknen Sie die Haut sorgfältig ab. Verwenden Sie keine Öle, Lotionen oder Puder, da diese die Haftfähigkeit des Kondom-Urinals beeinträchtigen. Verwenden Sie InView Kondom-Urinale nicht bei Hautirritationen oder verletzter Haut.

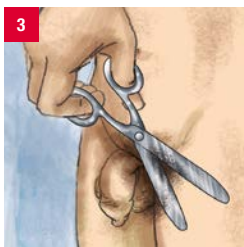

Um die Schamhaare aus dem Versorgungsgebiet zu halten, können Sie ein Papiertuch zweimal zusammenfalten und dann die entstandene Ecke abreißen. Öffnen Sie das Papiertuch und überdecken Sie Ihre Haare, indem Sie den Penis durch das Loch schieben. Nachdem Sie das InView Kondom-Urinal angebracht haben, können Sie das Papiertuch einfach abreißen. Alternativ oder wenn Haare in das Versorgungsgebiet ragen, rasieren oder kürzen Sie Ihre Haare mit einer stumpfen Schere.



Öffnen Sie die Verpackung an der perforierten Stelle und entfernen Sie die Verpackung, indem Sie die Innenseite nach außen stülpen.



Entfernen Sie bei InView Extra und InView Special die weiße Kappe, indem Sie die Spitze des Kondom-Urinals oberhalb der weißen Kappe zusammendrücken und das Kondom-Urinal abnehmen.



Halten Sie den Penis fest. Drücken Sie die Kondom-Urinal-Spitze zusammen und legen Sie das Kondom-Urinal an der Eichel an. Wenn Sie unbeschnitten sind, lassen Sie die Vorhaut in der natürlichen Position.



Entrollen Sie das InView Kondom-Urinal mit der anderen Hand über die gesamte Penislänge. Halten Sie dabei die Spitze weiter zusammengedrückt, um sicherzustellen, dass sich ein Reservoir zwischen Eichel und Ablass bildet. Dies gewährt ein sicheres Abfließen des Harns.



Umfassen und drücken Sie das Kondom-Urinal im Bereich der Klebefläche für einen sicheren Halt sanft an.



Schließen Sie das Kondom-Urinal an ein Ableitungssystem, wie zum Beispiel einen Beinbeutel (zur Tagesversorgung) oder einen Bett- oder Nachtbeutel (zur Nachtversorgung), an.



Zum Entfernen lösen Sie die Haftfläche durch Abrollen des InView Kondom-Urinals über die gesamte Penislänge sanft von der Haut ab.

Deutschland

Hollister Incorporated
Niederlassung Deutschland
Riesstraße 25
D-80992 München

Beratung für Betroffene:
Telefon: 0 800/4 65 54 78 – gebührenfrei

Beratung für Fachpersonal:
Telefon: 0 800/1 01 50 23 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 0 89/99 28 86-122
Telefax: 0 800/4 65 54 32 – gebührenfrei
Mo.–Do.: 8.00–17.00 Uhr,
Fr.: 8.00–16.00 Uhr

E-Mail: beratungsteam@hollister.com

www.hollister.de

Österreich

Hollister GmbH
Heinrich-Collin-Straße 1
A-1140 Wien

Beratung:
Telefon: 0 800/80 81 88 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 01/8 77 08 00-0
Telefax: 01/8 77 08 00-22
Mo.–Do.: 8.00–16.00 Uhr,
Fr.: 8.00–14.00 Uhr
E-Mail: hollister.oesterreich@hollister.com

Schweiz

Hollister
Bernstrasse 388
CH-8953 Dietikon

Beratung:
Telefon: 0 800/55 38 39 – gebührenfrei

Bestellung:
Telefon: 044/730 45 05
Telefax: 044/730 54 44
Mo.–Do.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–17.00 Uhr,
Fr.: 8.00–12.00 Uhr, 13.00–16.00 Uhr

E-Mail: info@hollister.ch

www.hollister.ch