

Vertrieb durch/Distribution by:  
FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
für Heil- und Hilfsmittel mbH  
Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)



Hersteller/Manufacturer:  
Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
Unit 93, Building 12, No. 818,  
Qiming Road, Yinzhou, 315105  
 Ningbo, Zhejiang, China

## **Gebrauchsanweisung für 3-Kammer Beinbeutel steril**

**Gültig für: KBB750-10s, KBB750-50s**

**Versionsnr.: KBB750s.09.16    Freigabedatum: 09.2016    Revisionsnr.: 1**

### **Beschreibung:**

Der Beinbeutel ist erhältlich in der Größe 750ml. Der Beinbeutel besteht aus PVC und setzt sich zusammen aus einem Beinbeutel mit Abflussfunktion und einer Steuereinheit (Einlass und Ablassrohr, Abflussventil). Es handelt sich um ein medizinisches Produkt der Klasse I steril und ist nur für den Einmalgebrauch bestimmt. Der Adapter ermöglicht mittels handelsüblichen Tannenzapfen-Konnektor den Anschluss an einen weiteren Urinbeutel.

### **Indikation:**

Das Produkt dient dem Auffangen und Sammeln von Urin, der durch den Katheter abgeleitet wird sowie der Ableitung des aufgefangenen Urins. Es ist besonders geeignet für Patienten mit Behinderung sowie bewegungsunfähige und bettlägerige Patienten.

### **Kontraindikation:**

Nein

### **Nebenwirkungen:**

Keine

### **Messfunktion:**

Keine. Die Messanzeige dient dem medizinischen Personal als Schätzhilfe, ist für eine genaue Messung aber ungeeignet. Hierfür bitte geeignete Messbecher nutzen.

### **Gebrauchsanweisung:**

- Waschen Sie die Hände immer vor und nach dem Leeren des Beutels.
- Fixieren Sie den Beinbeutel am Bein des Patienten unter der Höhe der Blase. Liegt der Patient, hängen Sie den Beinbeutel auf Höhe der Blase oder unter der der Höhe der Blase auf.
- Schließen Sie das Ablassventil, bevor der Beutel mit dem Patienten verbunden wird. Das Austauschen des Beinbeutels erfolgt nach Ermessen des medizinischen Fachpersonals.
- Überwachen Sie das System in regelmäßigen zeitlichen Abständen um sicherzugehen, dass der Urin frei fließt.
- Sobald der maximale Füllstand des Beutels erreicht ist, öffnen Sie das Ablassventil und entleeren Sie den Inhalt in einen geeigneten Sammelbehälter.
- Danach schließen und reinigen Sie das Ablassventil. Nutzen Sie zur Reinigung ein Desinfektionstuch und entfernen Sie mit dessen Hilfe alle Rückstände am Ablassventil.
- Bei Verbindung des Beinbeutels mit einem Urinbeutel muss sichergestellt werden, dass die Verbindung luftdicht abgeschlossen ist.
- Der angeschlossene Urinbeutel muss sich unter der Höhe des Beinbeutels befinden.

### **Sicherheitshinweise:**

- Aus nicht-toxischer, skaliertes PVC Folie medizinischer Qualität, mit einem knickfesten PVC-Schlauch und Rückschlagventil gefertigt und für das Urinsammeln bettlägeriger Patienten geeignet.
- Der Beutel ist 100% leakagefrei und mit verstärkten, dehnbaren Riemchen einfach am Patientenbein anzulegen. Er ist ideal für sowohl kurzfristige als auch langfristige Urinsammlung.
- Nur für den Einzelgebrauch. Nach der Nutzung im Sondermüll entsorgen. Das Produkt darf nicht wiederverwendet oder resterilisiert werden. Eine Wiederverwendung birgt das Risiko von Infektionen und kann die Leistung des Produktes bis hin zum Funktionsausfall beeinträchtigen. Dieses Gerät sollte nur unter der Leitung von medizinischem Personal, welches fachgerechtes Training erhalten hat, verwendet werden.
- Nicht verwenden, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Während des Gebrauchs muss der Beutel aufrecht hängen, im Schlauch dürfen keine Schleifen und Knicke vorhanden hängen.
- Nicht in direktem Sonnenlicht, bei extremen Temperaturen oder in hoher Feuchtigkeit lagern.

Vertrieb durch/Distribution by:  
 FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
 für Heil- und Hilfsmittel mbH  
 Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin  
[www.forlife.info](http://www.forlife.info)



Hersteller/Manufacturer:  
 Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
 Unit 93, Building 12, No. 818,  
 Qiming Road, Yinzhou, 315105  
 Ningbo, Zhejiang, China

## Bedeutung der Symbole auf der Verpackung



Sterilisiert mit  
 Ethylenoxid



Bevollmächtigter  
 Repräsentant



Latex frei



Beinhaltet DEHP



Nicht resterilisieren



Nicht zur Wieder-  
 verwendung geeignet



Hersteller



Herstellungsdatum



Verwendbar bis



Benannte Stelle  
 TÜV Rheinland



Bestellnummer



Lot-/Chargennummer



Bei beschädigter Ver-  
 packung nicht verwenden



Achtung



Hohe Feuchtigkeit



Direktes Sonnenlicht



Extreme Temperaturen



Gebrauchsanweisung

Vertrieb durch/Distribution by:  
 FOR LIFE Produktions- und Vertr.ges.  
 für Heil- und Hilfsmittel mbH  
 Wendenschloßstraße 142 · 12557 Berlin.

Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd.  
 Unit 93, Building 12, No. 818, Qiming Road,  
 Yinzhou, 315105 Ningbo, Zhejiang, China

Greatcare Medical GmbH  
 Gildenweg 6, 50354 Hürth, Germany

16558 10-2016 09-2021

Made in China

Schlauchlänge: 10 & 50 CM

**Contains Phthalates:**  
 There are no known residual risks for  
 Children, pregnant or nursing women.



12465603; 12465626

KBB750-10; KBB750-50