


# urisan®

Der Applikator für Kondom-Urinale

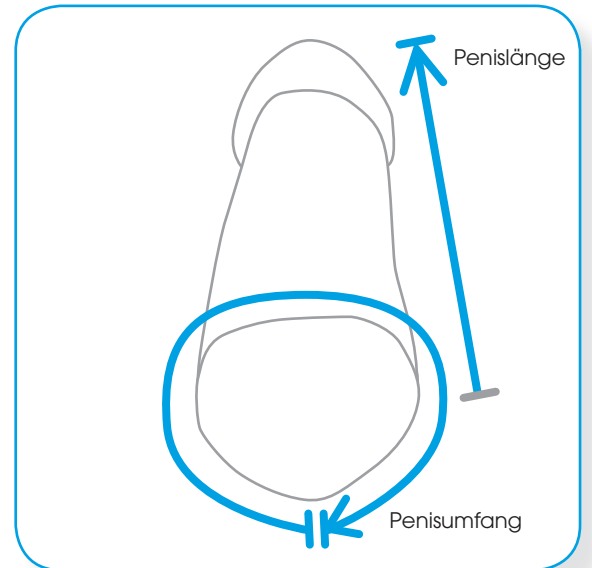

Vor der Bestellung des urisan® Applikators für Kondom-Urinale müssen Sie die für Sie empfohlene Größe anhand Ihres Penis-Umfangs ermitteln:

## SO MESSEN SIE RICHTIG

### Die Penislänge:

Messen Sie die Länge Ihres Penis im voll erregten Zustand. Legen Sie dabei ein Maßband (hier runterladen und ausdrucken) oben am Schaft des erigierten Penis an und messen Sie von dort aus bis zur Spitze der Eichel.

### Der Penisumfang:

Auch der Penisumfang wird am voll erigierten Penis gemessen. Messen Sie direkt am Penisschaft, indem Sie das Maßband um den Penis legen. Achten Sie bei der Anwendung des Maßbandes auf scharfe Papierkanten!

Im Falle einer Impotenz gehen Sie bitte wie folgt vor:

Stülpen Sie über den Rand eines herkömmlichen Vergrößerungs-Zylinders einen passenden Stauring\*. Pumpen Sie den Penis auf die Größe einer natürlichen Erektion. Ziehen Sie den Stauring auf den Penisschaft und lösen Sie den Zylinder vom Penis. Gehen Sie beim Messen wie oben beschrieben vor.

\*Bitte beachten Sie die jeweiligen Herstellerhinweise für die Nutzung eines Staurings und tragen Sie diesen niemals länger als 20 Minuten.

