

urisan®

Unser Service für Sie:

Möchten Sie Kondomurinale, Beinbeutel,
Bettbeutel, Fixiermaterial und weiteres
Zubehör günstig kaufen?

Benötigen sie Gratis Muster zum testen?

Dann besuchen Sie unseren Onlineshop:

www.urisan.de

Ansprechpartner:

urisan®

Experten für ableitende Kontinenz

Markgrafenstraße 39
D- 40545 Düsseldorf

Hotline: +49 (0) 211 557 843 0

E-Mail: service@urisan.de

Fassung 2023

urisan®

Die innovative Lösung für Männer mit
Inkontinenz:

Der Applikator für Kondom-Urinale



Kondom-Urinale
in Sekunden
faltenfrei und
sicher anlegen!

Gebrauchsanweisung

urisan®

Sie erhalten urisan® für alle gängigen Kondom-Urinal-Größen:



02

urisan®

Inhalt des urisan®
Basis-Sets:

Folgende Bestandteile enthält das urisan® Set:

- Batteriebetriebene Vakuumpumpe
- Aufsatz aus Silikon in dem von Ihnen gewählten Durchmesser
- 4 Mignon AAA/LR6/1,5 V Batterien (2 bereits im Gerät enthalten)
- urisan® Gleitgel (50 ml)
- urisan® Reinigungsspray (50 ml)
- Kulturbeutel zur Aufbewahrung



Bitte überprüfen Sie Ihr urisan® Basis-Set vor der ersten Verwendung auf Vollständigkeit

03

Die innovative Lösung für Männer mit Inkontinenz

Die Vorteile des urisan® Applikators auf einen Blick

- Faltenfreies Anlegen von Kondom-Urinalen
- Auch bei eingeschränkter Handfunktion des Nutzers anwenderfreundlich
- Passend für alle auf dem Markt befindlichen Kondom-Urinalen
- Erhältlich für alle gängigen Kondom-Urinal-Größen
- Unterschiedliche Farbcodierungen und Durchmesser-Bezeichnungen am Gerät
- Meist keine Hilfsperson erforderlich
- Einfach zu reinigen
- Einmalige Anschaffungskosten

Endverbraucher:

- Nutzer mit erektiler Dysfunktion (Impotenz)
- Nutzer mit eingeschränkter Handfunktion
- Männer mit retrahiertem Penis (Schlupfpenis)
- Männer mit sehr kleinem, schmalen Penis

Pflegepersonal:

- Anlegen des Kondom-Urinals ohne direkte Berührung der Eichel und des Penischafts
- Mit Hilfe von urisan® lassen sich Kondom-Urinalen bei allen Penis-Voraussetzungen anlegen
- Keine Erektion erforderlich

urisan® ermöglicht Ihnen das einfache Anlegen von Kondom-Urinalen

Das Kondom-Urinal

Bei einer Inkontinenz ist das Kondom-Urinal das Hilfsmittel der Wahl, welches von männlichen Inkontinenten verwendet werden sollte. Es hat die Form eines Kondoms und besitzt am Ende eine Anschlussmöglichkeit für einen Schlauch, der den Urin in einen Beutel ableitet.

Kondom-Urinalen stellen die mit Abstand beste Alternative sowohl zu aufsaugenden Hilfsmitteln wie Vorlagen oder Windeln, als auch zum Dauerkatheterismus dar.

Die beste Alternative

Gegenüber einem Dauerkatheter besteht der weitere Vorteil, dass ganz normale Urinbeutel verwendet werden und keine sterilen Urinbeutel, welche bei einem Dauerkatheter unbedingt nötig sind. Auch ist Bakterien – wie bei einem Dauerkatheter – nicht der direkte Weg in die Blase geöffnet.

Die durch die Harnröhre geführten Blasenverweilkatheter – als mögliche Folge von Verletzungen der Harnröhre und aufsteigenden Infektionen – ausgelösten Harnröhrenfisteln und andere Erkrankungen werden bei der Verwendung von Kondom-Urinalen vollständig vermieden. Auch treten keine schmerzhaften Blasenschrumpfung auf, wie es sonst bei Blasenverweilkathetern häufig der Fall ist.

1. Vorbereitung: So finden Sie das passende Kondom-Urinal

Um den richtigen Sitz eines Kondom-Urinals zu gewährleisten, muss vor dem Kauf die passende Kondomgröße gewählt werden.

Alle namhaften Hersteller von Kondom-Urinalen bieten hierzu Maßbänder oder Schablonen an. Mit diesen können der Durchmesser und die Länge Ihres Penis bestimmt werden.

Sollte eine Unsicherheit bestehen, welche von zwei Urinal-Kondom-Größen die Passendere ist, empfehlen wir Ihnen, zunächst die kleinere zu wählen. Sollte das Kondom zu groß gewählt werden, kann es passieren, dass es undicht ist oder abrutscht.

Kondom-Urinalen werden in unterschiedlichen Klebeflächen-Längen angeboten. Eine Länge von 5 cm reicht für den überwiegenden Teil der Männer aus. Auch bei einem retrahierten Penis. Für Nutzer, die eine längere Klebefläche wünschen, werden auch entsprechende Kondom-Urinalen angeboten.

Für den Bezug von Maßbändern oder Schablonen empfehlen wir Ihnen folgende Hersteller:

- Manfred Sauer GmbH
- B. Braun Melsungen AG
- Coloplast GmbH
- Hollister

oder unter www.urisan.de

2. Was Sie vor dem Anlegen des Kondom-Urinals beachten sollten:

Bitte beachten Sie vor der ersten Anwendung die Sicherheitshinweise auf den Seiten 14 und 15.

Optimal wäre es, wenn Sie grundsätzlich für jede Anwendung Ihr Schamhaar kürzen, damit sich dort kein Kleber festsetzen kann. Vor der Anwendung sollten Sie sich die Hände gut mit Seife reinigen.

Folgende Bestandteile sollten in Reichweite sein:

- Das passende Kondom-Urinal
- Eine kleine Menge (2 bis 3 Tropfen) urisan® Gleitgel
- Ein Urinbeutel (Ober-, Unterschenkel oder Bettbeutel)
- Ein Abdecktuch (falls das Schamhaar nicht gekürzt ist)

Sollten keine selbstklebenden Kondom-Urinalen verwendet werden, benötigen Sie außerdem:

- Hautkleber oder
- Haftstreifen



3. So gehen Sie vor dem Anlegen des Kondom-Urinals weiter vor:

Der Penis sollte mit warmem Wasser und mit PH-neutraler Seife ohne fettige Inhaltsstoffe gewaschen und sorgfältig getrocknet werden.

Es sollte keine Restfeuchtigkeit vorhanden sein. Verwenden Sie auf keinen Fall fetthaltige Salben oder ähnliches, da sonst die Haftfähigkeit des Urinal-Kondoms nicht gewährleistet ist.

Damit keine Schamhaare unter die Klebefläche des Urinal-Kondoms geraten, sollten diese (wie bereits erwähnt), gekürzt werden.

Alternativ können Sie auch ein spezielles Abdecktuch verwenden, das in der Mitte ein Loch hat. Sollte dies nicht vorhanden sein, können Sie auch ein Taschentuch verwenden, in dessen Mitte Sie ein Loch schneiden. Beides sollten Sie bis zum Haaransatz über den Penis streifen.



4.1 So gehen Sie mit dem urisan® Applikator vor:

Verwenden Sie möglichst selbstklebende Kondom-Urinalle.

- 1 Rollen Sie das Kondom-Urinal (je nach gewünschter Länge der Pufferzone) um zwei oder mehr Wicklungen ab.
- 2 Legen Sie das Kondom-Urinal in die Aufnahmeglocke des Applikators ein. Schieben Sie das Schlauchende bis zum Ansatz in den Unterdruck-Kanal.
- 3 Falls Sie das Kondom mehrfach abrollen, so sollte es komplett in die Aufnahmeglocke eingelegt werden. Bitte achten Sie darauf, dass der Unterdruck-Kanal frei (luftdurchlässig) bleibt.
- 4 Der Ring des Kondom-Urinals muss 100% korrekt in die dafür vorgesehene Mulde eingelegt werden!



4.2 So gehen Sie mit dem urisan[®] Applikator vor:

- 5 Verteilen Sie nun 2 bis 3 Tropfen urisan[®] Gleitgel auf die Eichel des Penis oder alternativ innerhalb des Rollrandes. Legen Sie die Eichel innerhalb des Rollrandes in den urisan[®] Applikator ein. Sollten Sie unbeschritten sein, so ziehen Sie die Vorhaut nicht zurück. Für einen optimalen Saugeffekt sollte keine Lücke zwischen Rollrand und Eichel bestehen.
- 6 Schalten Sie nun die Pumpe des urisan[®] Applikators ein.
- 7 Lassen Sie die Eichel in die Aufnahmeglocke saugen. Der äußere Rollrand des Kondom-Urinals sollte möglichst nicht mit dem Gleitgel in Berührung kommen, da dies das Abnehmen des Rollrings erschweren kann. Sollte dies dennoch der Fall sein, so entfernen Sie das Gleitgel mit einem trocknen Tuch. Falls Sie keine selbstklebenden Kondom-Urinalen verwenden, so tragen Sie vor dem Abrollen den entsprechenden Klebstoff auf, oder befestigen Sie das doppelseitige Klebeband.



4.3 So gehen Sie weiter mit dem urisan[®] Applikator vor:

- 8 Beginnen Sie nun, das Kondom-Urinal abzurollen. Nutzen Sie dafür zunächst die beiden Eingriffmulden – der Rollring lässt sich so besser abrollen. Ziehen Sie während des Abrollens den Penis leicht in die Länge, damit das Kondom-Urinal einen faltenfreien, sicheren Sitz bekommt.
- 9 Schalten Sie die Pumpe* des Applikators ab und lösen Sie ihn vom Penis. Sollte der restliche Ring des Kondom-Urinals stören, so schneiden Sie diesen mit einer Schere, die eine runde Spitze hat, einfach ein.
- 10 Drücken Sie nun die Klebefläche des Kondom-Urinals rund um den Penisschaft leicht an, damit es gleichmäßig klebt.

Verbinden Sie dann den Schlauchansatz des Komdom-Urinals mit dem Adapter des Schlauchs am Urinbeutel.

Das Kondom-Urinal sollte spätestens nach 24 Stunden gewechselt werden. Entfernen Sie zu diesem Zweck den Adapter am Schlauch des Kondom-Urinals und rollen Sie es langsam ab. Ziehen Sie den Penis dabei leicht in die Länge, so dass das Abrollen erleichtert wird.

**Die Pumpe des Applikators verfügt über zwei Schalter. Der Untere dient dem Ein- und Ausschalten, der Obere stoppt sofort den Unterdruck, sollte dieser einmal zu stark sein.*



5. Reinigung des urisan® Applikators

Trennen Sie den Silikon Aufsatz mit einer leichten Drehbewegung von der Pumpe ab und sprühen Sie ihn mit einer geringen Menge des urisan®-Reinigungssprays ein.

Lassen sie dies kurz einwirken und spülen Sie den Silikon Aufsatz mit lauwarmem Wasser ab.

Bei der Pumpe reicht es aus, den flachen Teil mit einer geringen Menge des urisan®-Reinigungssprays einzusprühen und kurz einwirken zu lassen.

Anschließend den Silikon Aufsatz und die Pumpe mit einem trocknen Tuch abwischen.

Wenn Sie am Schluss den Silikon-Zylinder wieder auf die Pumpe setzen wollen, so tun Sie dies bitte wieder mit einer leichten Drehbewegung.

6. Fragen und Antworten zum urisan® Applikator

Müssen für die Verwendung von urisan® Kondom-Urinalen von einem bestimmten Hersteller verwendet werden?

Nein. Der urisan® Applikator eignet sich für alle auf dem Markt befindlichen Kondom-Urinalen.

Was passiert, wenn Flüssigkeit (Urin) in die Pumpe eintritt?

Sollte es tatsächlich vorkommen, dass während der Nutzung des urisan® Applikators etwas Urin austritt, dann beenden Sie den Vorgang sofort. Ziehen Sie dann den oberen Teil aus Silikon ab und wischen Sie die Flüssigkeit von der Pumpe. Öffnen Sie das Batteriefach, entnehmen Sie die Batterien und prüfen Sie, ob alles trocken ist. Wenn Sie zügig handeln, sollte nahezu keine Flüssigkeit in die Pumpe eingetreten sein. Den oberen Teil können Sie einfach mit lauwarmem Wasser abspülen. Bitte achten Sie darauf, dass vor der nächsten Verwendung alles trocken ist.

Benötigt mein Penis eine Mindestgröße, damit ich mit urisan® Kondom-Urinalen verwenden kann?

Nein. Das System urisan® ist so konzipiert, dass er für alle Penislängen und Penisumfänge geeignet ist.

Birgt die Anwendung von urisan® Nebenwirkungen oder Risiken?

Nein. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung treten keine Nebenwirkungen oder Risiken auf.

Weitere Fragen und Antworten finden Sie auf <http://urisan.de/faq>

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bitte achten Sie darauf, dass der Penis unmittelbar vor der Anwendung des urisan® Applikators trocken ist. In das Gerät sollte möglichst keine Flüssigkeit laufen.

Der Silikon-Zylinder darf nur mit der mitgelieferten Pumpe und dem vorgegebenen Unterdruck verwendet werden. Bei zu hohem Unterdruck könnte es zu Verletzungen der Eichel kommen.

Verwenden Sie vor der Benutzung des Kondom-Urinals keine fetthaltigen Substanzen, da sonst die Verklebung des Kondom-Urinals mit dem Penis-Schaft nicht hält.

Die Vakuumpumpe ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden. Halten Sie das Gerät von Kindern fern.

Das Gerät ist nur zum Ansaugen von Luft geeignet und darf nicht für das Absaugen aggressiver, entzündlicher oder explosiver Gase verwendet werden. Saugen Sie mit dem Gerät weder Wasser, noch andere Flüssigkeiten an.

Achten Sie darauf, dass der Zylinder innen stets trocken ist und keine Feuchtigkeit enthält. Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es auch nicht in nasser Umgebung. Tauchen sie das Gerät niemals in Wasser ein.

Entsorgung

Elektrogeräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Endverbraucher ist verpflichtet, Altgeräte – getrennt vom Hausmüll – z.B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet. Eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt. Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder überall dort, wo Batterien verkauft werden, abgeben.

Artikelnummer	2018 5936
Betriebsspannung	2 x 1,5 V/DC Batterie, Typ AA
Leistungsaufnahme	0,3 W
Höhe	210 mm
Breite	90 mm
Betriebsbedingungen	-20 bis +45 °C / 20 - 80% rL
Lagerbedingungen	-20 bis +45 °C / 20 - 80% rL
Gewicht	105 g

